

Manuel d'utilisation

Pour tous les modèles Sport



Kidsmoovin'
FreeMoovin'

FR



Merci

d'avoir choisi PlayMoovin'...

Nous espérons que le produit et le service que vous avez reçus vous donneront entière satisfaction. Prenez le temps de lire les instructions contenues dans le présent manuel pour vous familiariser avec votre nouveau fauteuil PlayMoovin' et pour profiter d'une performance et d'une longévité optimales.



Sébastien PASSEMARD,
Co-fondateur et co-gérant

AVERTISSEMENT!

Lisez impérativement ce manuel avant d'utiliser votre équipement. En cas de doute concernant les avertissements ou les instructions, contactez votre professionnel de santé (médecin ou thérapeute) avant d'utiliser ce matériel pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement.

► REMARQUE :

Les modèles Sport ne sont pas destinés à un usage quotidien.

Sommaire

4	Remarques importantes	13	Procédure 1
4	Définitions des termes employés dans le manuel	13	Montage des roues propulsives.
4	Choisir le bon fauteuil	14	Procédure 2
4	Pression des pneus	14	Remplacement du coussin H+ (insert en mousse)
5	Transport	14	Mise en place dossier H+ et du kit enfant
5	Consignes de sécurité	15	Procédure 3
5	Consignes de sécurité	15	Réglage de l'axe à déverrouillage rapide
5	Environnement	16	Procédure 4
5	Pincement des doigts	16	Remplacement de la main-courante
6	Musculation	16	Réparation/Remplacement de la roue propulsive, du pneu/de la chambre à air
6	Stabilité et équilibre	17	Procédure 5
7	Consignes de sécurité et de conduite	17	Remplacement des fourches et roulettes KidsMoovin'
9	Durée de vie	18	Procédure 6
10	Liste des contrôles de sécurité	19	Remplacement des fourches et roulettes FreeMoovin'
11	Guide aide au diagnostique	20	Procédure 7
12	Entretien	18	Réglage hauteur de la bascule du FreeMoovin'
12	Suggestions d'entretien	21	Procédure 8
		22	Réglage hauteur de la bascule du KidsMoovin'
		23	Caractéristiques techniques
		20	Recyclage/Élimination
		24	Garantie
		21	GARANTIE

Remarques importantes

Il est important de lire intégralement le manuel pour éviter tout risque d'endommagement lors de l'utilisation et de la manipulation de votre fauteuil PlayMoovin'.

Définitions des termes employés dans le manuel

DANGER !

Indication d'un risque potentiel de blessures graves ou de décès en cas de non-respect des consignes

AVERTISSEMENT :

Indication d'un risque potentiel de blessure en cas de non-respect des consignes.

ATTENTION :

Indication que le matériel peut être endommagé si le conseil fourni n'est pas suivi.

REMARQUE :

Conseil d'ordre général ou pratique recommandée

REMARQUE :

Les modèles Sport ne sont pas destinés à un usage quotidien.

Choisir le bon fauteuil

En tant que fabricant de fauteuils roulants, PlayMoovin' s'efforce de proposer des modèles variés destinés à répondre aux différents besoins des utilisateurs. Cependant, le choix final du type de fauteuil appartient à l'utilisateur et au professionnel de santé qui le suit.

Ne prenez PAS appui sur la palette pour monter ou descendre du fauteuil.

Portez toujours votre système de retenue, s'il vous en a été prescrit un.

Il est possible que le fauteuil illustré et décrit dans le présent manuel ne soit pas complètement identique au modèle et aux accessoires que vous avez achetés.

Cependant, toutes les instructions sont pertinentes, indifféremment des éventuels accessoires que vous avez ajoutés au moment de la commande.

La durée de vie prévue de votre fauteuil PlayMoovin' est de 5 années, pour la coque et 2 ans pour les autres pièces en conditions normales par un utilisateur unique. La durée de vie de votre fauteuil dépendra essentiellement du handicap de l'utilisateur et de l'entretien du fauteuil. Différents utilisateurs profiteront d'une durée de vie plus ou moins courte de leur fauteuil par rapport à la durée énoncée ci-dessus.

N'utilisez et n'installez AUCUN composant tiers sur le fauteuil sans l'approbation formelle de PlayMoovin'.

Pression des pneus

N'utilisez le fauteuil QUE SI la pression des pneus est correcte.

Ne gonflez PAS les pneus excessivement. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner l'explosion des pneus et entraîner des blessures.

REMARQUE :

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

Consignes de sécurité

Transport

AVERTISSEMENT :

Système d'attache et système de retenue.

- PlayMoovin' déconseille le transport de l'utilisateur dans son fauteuil à bord de véhicules motorisés.
- PlayMoovin' conseille le transfert de l'utilisateur dans un siège approprié et l'utilisation des systèmes de retenue disponibles.
- PlayMoovin' n'émet aucune recommandation concernant les systèmes d'attache pour le transport de fauteuil roulant.
- Concernant les ceintures de retenue, il incombe au revendeur, au thérapeute et à tout autre professionnel de la santé de déterminer si un système de retenue est préconisé pour une utilisation sécurisée du fauteuil.
- Toute chute depuis le fauteuil peut entraîner des blessures graves.
- Ne prenez PAS appui sur la palette pour monter ou descendre du fauteuil.

Consignes de sécurité

Ne dépassez jamais la charge maximale de 100 kg combinée entre le poids de l'utilisateur et tout autre accessoire éventuellement fixé ou embarqué. Toute charge supérieure pourrait endommager votre fauteuil PlayMoovin' ou vous faire basculer, vous faire perdre le contrôle du fauteuil et entraîner de graves blessures pour vous et toute autre personne.

Environnement

AVERTISSEMENT :

La surface de produits exposés à des températures extrêmes peut devenir très chaude ou froide et entraîner des blessures.

AVERTISSEMENT :

N'exposez pas le produit ou ses accessoires à des sources de chaleur excessive, ni à des flammes nues.

Pincement des doigts

AVERTISSEMENT :

Ce produit comporte des organes mobiles. Veillez à ne pas vous pincer les doigts. Faites toujours preuve d'extrême prudence pendant le déplacement du fauteuil.

La section « Sécurité et manipulation » du fauteuil exige une attention particulière de la part de l'utilisateur du fauteuil et de son assistant.

Le manuel décrit les procédures et les techniques courantes destinées à garantir une utilisation sécurisée du fauteuil. Il est important de pratiquer et de maîtriser ces techniques jusqu'à ce que l'utilisateur sache manœuvrer le fauteuil et contourner confortablement les obstacles courants.

Ces informations sont vouées à servir de guide élémentaire uniquement. Les techniques décrites dans les pages suivantes ont été adoptées avec succès par de nombreux utilisateurs.

Dans l'exécution de leurs activités quotidiennes, les utilisateurs de fauteuil roulant développent souvent leurs propres techniques, lesquelles peuvent différer de celles exposées ici.

PlayMoovin' invite et encourage les utilisateurs à adapter les techniques à leurs besoins afin de surmonter les obstacles architecturaux qu'ils pourraient rencontrer.

Les techniques décrites ici sont un point de départ pour le nouvel utilisateur de fauteuil roulant et son assistant, avec une priorité marquée pour l'aspect 'sécurité'.

Consignes de sécurité

Musculation

PlayMoovin' DÉCONSEILLE l'utilisation de ses fauteuils roulants dans le cadre de séances de musculation. Les produits PlayMoovin' N'ONT PAS été conçus ni testés pour une utilisation dans le cadre de séances de musculation. Si le fauteuil est utilisé lors de séances de musculation, PlayMoovin' décline toute responsabilité en cas de blessure et la garantie sera nulle et non avenue.

Stabilité et équilibre


Pour garantir une bonne stabilité et un fonctionnement optimal de votre fauteuil, veillez au bon équilibre de ce dernier. Votre fauteuil est prévu pour rester en position droite et stable pendant vos activités courantes quotidiennes dans la mesure où vous ne vous penchez pas hors de son centre de gravité.

Quasiment toutes les activités qui impliquent le déplacement du fauteuil ont un impact sur le centre de gravité.

Vérifiez que les roues avant sont orientées vers l'avant lorsque vous vous penchez en avant. Pour cela, faites avancer le fauteuil, puis faites-le reculer en ligne droite. Voir Fig. 1.

⚠ AVERTISSEMENT :

La position des réhausse-pieds, ainsi que le réducteur d'assise sont autant d'éléments qui ont un impact direct sur la stabilité du fauteuil. Tout changement apporté à l'un ou à plusieurs de ces éléments peut compromettre la stabilité du fauteuil. Soyez **EXTRÊMEMENT** prudent lorsque vous utilisez pour la première fois une nouvelle position d'assise.

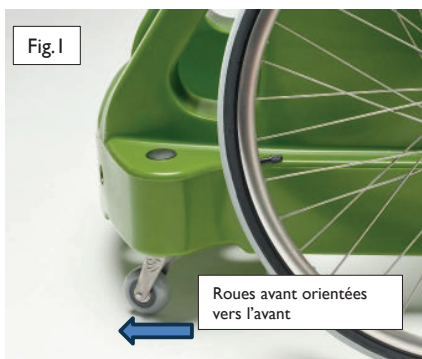

En apprenant à manipuler confortablement votre fauteuil, vous serez plus à-même de gérer les obstacles du quotidien. Pensez à votre propre centre de gravité pour maintenir stabilité et équilibre.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité et de conduite

La conception et la construction du fauteuil sont réalisées pour garantir une sécurité maximale. A l'échelle internationale, toutes les exigences applicables en matière de normes de sécurité sont respectées, voire dépassées. Toutefois, l'utilisateur peut se mettre en situation de danger en utilisant son fauteuil de façon incorrecte. Pour votre sécurité, vous devrez impérativement respecter les consignes suivantes.

Les altérations ou réglages non professionnels ou erronés augmentent le risque d'accidents. En tant qu'utilisateur de fauteuil roulant, vous participez à la circulation publique, sur routes ou trottoirs. Vous êtes par conséquent tenu de respecter le code de la route.

Lors de votre première utilisation du fauteuil, roulez prudemment.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre nouveau fauteuil roulant.

Avant chaque utilisation de votre fauteuil, contrôlez impérativement :

- Les axes à déverrouillage rapide des roues arrière.
- Les bandes velcro de l'assise et du dossier.
- Les pneus, la pression.

Avant de procéder à d'éventuels réglages sur votre fauteuil, il est important de lire attentivement la section correspondante du manuel d'utilisation.

Des nids de poule ou un sol irrégulier peuvent faire basculer le fauteuil roulant lors de la montée ou de la descente des pentes. Si une marche ou une montée est abordée de face, le corps doit être incliné en avant.

DANGER !

Ne dépassez **JAMAIS** la charge maximale de 100 kg combinée entre l'utilisateur et tout autre accessoire éventuellement embarqué. Veuillez noter les informations relatives au poids pour les options plus légères, lesquelles sont indiquées séparément. Toute charge supérieure pourrait endommager le fauteuil ou vous faire basculer, perdre le contrôle et entraîner de graves blessures pour vous et toute autre personne.

AVERTISSEMENT :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Ce fauteuil est composé de petites pièces qui, dans certaines conditions, peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

- Dans la mesure du possible, au cours d'un déplacement à bord d'un véhicule pour personnes handicapées, il est conseillé aux occupants de s'asseoir sur les sièges et d'utiliser le système de retenue approprié. C'est le seul moyen d'assurer une protection optimale aux occupants en cas d'accident.
- Pour éviter les chutes et situations dangereuses, il est recommandé de vous entraîner et de vous familiariser avec votre nouveau fauteuil sur une surface plane offrant une bonne visibilité.
- Le fauteuil roulant sert exclusivement au transport d'une seule personne à la fois. Toute autre utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu du vélo.
- Pour monter et descendre du fauteuil, ne prenez pas appui sur les repose-pieds.
- Selon le diamètre et le réglage des roues avant, ainsi que le centre de gravité du fauteuil, les roues avant peuvent se mettre à vibrer à mesure que la vitesse du fauteuil augmente. Les roues avant risquent alors de se bloquer et le fauteuil de basculer. Il est donc essentiel de régler correctement les roues avant (voir le chapitre "Roues avant").
- Ne descendez pas une pente sans frein et déplacez-vous lentement. Ce produit a été testé pour une vitesse maximale de 10 km/h. Au-delà de cette vitesse, selon la configuration et/ou le physique/les capacités physiques de l'utilisateur, les roues avant peuvent se mettre à osciller et éventuellement entraîner des blessures pour l'utilisateur.
- Monter ou descendre une pente latéralement augmente le risque de voir le fauteuil basculer sur le côté.
- Changer le centre de gravité peut avoir un impact sur le comportement du fauteuil dont vous devez être conscient. Il est recommandé de vous entraîner, par exemple en pente ou lors du franchissement d'obstacles. Familiarisez-vous avec les différents comportements en présence d'un accompagnateur.
- Il est recommandé aux utilisateurs inexpérimentés d'utiliser des roulettes anti-basculés.

Consignes de sécurité

- Les roulettes anti-basculées empêchent le fauteuil de basculer accidentellement vers l'arrière. En aucun cas, elles ne doivent remplacer les roulettes de transit et servir au transport d'une personne dans un fauteuil dont les roues arrière auraient été retirées.
- Avec des réglages extrêmes et une posture inadéquate, le fauteuil risque de basculer, même sur une surface plane.
- Lorsque vous franchissez des côtes et des marches, penchez votre corps plus en avant.
- Lorsque vous descendez des côtes et des marches, penchez votre corps plus en arrière.
- N'accrochez pas d'objets lourds (sac de courses ou sac à dos) aux poignées, à l'appui-tête ou au dossier du fauteuil.
- Ils peuvent modifier le point de bascule et faire basculer le fauteuil en arrière.
- Si vous souhaitez atteindre un objet (placé devant, derrière ou latéralement par rapport au fauteuil), évitez de trop vous pencher afin de ne pas modifier le centre de gravité et risquer de faire basculer le fauteuil.
- Utilisez toujours votre fauteuil de manière adéquate. Évitez par exemple de franchir des obstacles sans avoir préalablement ralenti (marche, bord de trottoir).
- Ne montez et descendez les escaliers que si vous êtes accompagné. Des équipements à cet effet sont à votre disposition, comme les rampes d'accès et les ascenseurs. Utilisez-les. En l'absence de tels équipements, deux personnes sont nécessaires pour faire basculer le fauteuil et lui faire franchir les marches une à une en le poussant.
- L'accompagnateur doit toujours tenir le fauteuil par les parties fixes et non pas par les parties amovibles, comme le repose-pied ou la protection latérale.
- Lors de l'utilisation d'une rampe d'accès, pensez à positionner les roulettes anti-basculée (le cas échéant) en dehors de la zone à risque.
- Le fauteuil n'est pas conçu pour sauter ou descendre des marches.
- Avant d'utiliser votre fauteuil, vérifiez la pression des pneus. Pour les roues arrière, la pression doit être au moins de 6 bars. La pression maximale est indiquée sur la jante des pneus.
- Utilisez toujours les ascenseurs ou les rampes. S'il n'y en a pas, demandez à une tierce personne de vous aider. Ces personnes doivent saisir le fauteuil par les seules parties fixes du châssis.
- Si les toiles du dossier et du siège sont abîmées, remplacez-les immédiatement.
- N'équipez le fauteuil d'aucun dispositif électronique, dispositif de mobilité électrique ou mécanique, vélo à main ou tout autre dispositif non approuvé susceptible de modifier l'usage prévu du fauteuil ou sa structure.
- Soyez très vigilants avec les risques d'incendie, surtout avec les cigarettes allumées.
- Vérifiez que les axes à déverrouillage rapide des roues propulsives sont bien réglés et verrouillés. Si le bouton de l'axe à déverrouillage rapide n'est pas enfoncé, vous ne pouvez pas enlever la roue propulsive.
- Si vous utilisez une main courante métallique et freinez dans une longue pente ou pour réduire votre allure, le frottement peut chauffer la main courante et vous brûler les doigts.

Consignes de sécurité

- Si le fauteuil est exposé au soleil pendant une période prolongée, certaines parties du fauteuil peuvent chauffer (>41°C).
- Pour éviter de vous blesser aux mains, ne placez pas vos doigts entre les rayons lorsque le fauteuil est en déplacement.
- Lorsque vous utilisez votre fauteuil à l'extérieur, portez toujours des gants en cuir afin d'avoir une bonne prise et de protéger vos mains contre la saleté et la surchauffe.
- N'utilisez pas le fauteuil sur des pentes de plus de 10° d'inclinaison.
- Le degré d'inclinaison maximum des pentes dépend de la configuration du fauteuil, des capacités de l'utilisateur et du style de conduite. Les capacités de l'utilisateur et son style de conduite ne pouvant être prédéfinis, le degré d'inclinaison maximum des pentes ne peut être déterminé. Il revient donc à l'utilisateur, assisté de son accompagnateur, de déterminer l'inclinaison maximale afin d'éviter tout risque de basculement.
- N'utilisez pas le fauteuil sur des terrains boueux ou verglacés.
- N'utilisez pas le fauteuil dans des zones interdites aux piétons.
- Comme avec toutes les pièces amovibles, toute intervention présente le risque de se coincer les doigts. Manipulez le fauteuil avec précaution.
- N'utilisez pas le fauteuil sous une forte pluie, dans la neige, sur une chaussée glissante ou sur des surfaces accidentées.
- N'utilisez pas le fauteuil dans des environnements dangereux.

REMARQUE :

- L'efficacité des caractéristiques de conduite générales dépend de la pression des pneus. Le fauteuil sera considérablement plus léger et plus facile à manœuvrer si les pneus des roues arrière sont correctement gonflés et ont la même pression.
- Vérifiez la sculpture des pneus.
- N'oubliez pas que lorsque vous vous déplacez au milieu de la circulation, vous devez respecter toutes les réglementations relatives au code de la route.
- Dans la pénombre, portez des vêtements clairs ou réfléchissants de sorte à être vu par les autres usagers de la route. Veillez à ce que les réflecteurs latéraux et arrière du fauteuil restent bien visibles. Il est également recommandé d'installer une lumière.
- Faites attention de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous procédez à des réglages du fauteuil.
- Il est possible que les produits illustrés et décrits dans le présent manuel ne soient pas complètement identiques au modèle que vous avez acheté. Toutefois, toutes les instructions fournies dans le présent manuel sont valables pour votre matériel, malgré les éventuelles différences minimales.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les poids, mesures et autres données techniques indiquées dans le présent manuel. Tous les chiffres, dimensions et capacités indiqués dans ce manuel sont approximatifs et ne constituent pas des caractéristiques.
- Tout réglage de votre fauteuil, en particulier le réglage des composants inhérents à la sécurité, comme le dossier, doit être réalisé par les revendeurs agréés.
- En présence de modules supplémentaires comme le kit enfant, le dossier H+, etc., vérifiez que le fauteuil est approprié pour une telle configuration.

Liste des contrôles de sécurité

► **REMARQUE** : Un nettoyage régulier permettra de remarquer de manière précoce les pièces desserrées ou usées et améliorera le bon fonctionnement de votre fauteuil. Afin de fonctionner de manière efficace et sécurisée, votre fauteuil doit bénéficier de la même attention que tout autre véhicule. Un entretien régulier permettra de prolonger la durée de vie et la performance de votre fauteuil. Des réglages initiaux sont à prévoir afin d'adapter le fauteuil à votre corps et à vos préférences. Suivez les procédures d'entretien énoncées ci-dessous.

Article	Au début	Inspecter / Régler toutes les semaines	Inspecter / Régler tous les mois	Inspecter / Régler tous les ans
<p>► Général</p> <ul style="list-style-type: none"> Le fauteuil se déplace en ligne droite (ne tire pas de manière excessive d'un côté ou de l'autre). Coque - Inspectez le coque afin de déceler des fissures ou des signes d'endommagement Fixations - Vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées 	✓			✓ ✓
<p>► Réducteur d'assise et de dossier H+</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspectez visuellement afin de déceler toute déchirure ou signe d'affaissement. Inspectez les rabats et les fixations 	✓ ✓	✓	✓	✓
<p>► Roues propulsives</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'axe de réglage de la barre de carrossage est bien serrée. Vérifiez que les axes à déverrouillage rapide/tétra sont bien enclenchés Vérifiez que les roues ne sont pas voilées et tournent librement. 	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
<p>► Mains courantes</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspectez visuellement afin de déceler tout signe de rugosité ou de détérioration importante. 	✓			✓
<p>► Rayons</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspectez visuellement à la recherche de rayons voilés ou cassés. Vérifiez que tous les rayons sont bien serrés. 	✓ ✓		✓ ✓	
<p>► Roulettes avant et arrière</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le serrage de l'ensemble roue/fourche en faisant tourner une roue avant ; la roue avant doit ralentir et s'immobiliser progressivement. Desserrez / resserrez la vis d'axe si la roue présente du jeu et de la friction. Vérifiez que les roulements de la roue sont propres et exempts d'humidité résiduelle. <p>ATTENTION : Comme pour tout véhicule, il convient d'inspecter les roues et les pneus régulièrement afin de déceler tout signe d'usure et de craquelures. Les remplacer si besoin est.</p>	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓
<p>► Pneus</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspectez afin de déceler les plats et l'usure En présence de pneumatiques, vérifiez la pression des pneus. <p>ATTENTION : Comme pour tout véhicule, il convient d'inspecter les roues et les pneus régulièrement afin de déceler tout signe d'usure et de craquelures. Les remplacer si besoin est.</p>	✓ ✓	✓ ✓		
<p>► Nettoyage</p>	✓		✓	

Guide aide au diagnostique

Le fauteuil se déporte vers la droite	Le fauteuil se déporte vers la gauche	Virages lents ou performance ralentie	Présence de jeu dans les roues avant	Grincements et cliquetis	Le fauteuil est instable	Solutions
✓	✓	✓	✓			Vérifiez que la pression de tous les pneus est identique
		✓	✓	✓	✓	Vérifiez que les axes de roues avant sont bien serrés Vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées
				✓	✓	Vérifiez que les rayons et les raccords sont bien serrés
✓	✓		✓			Vérifiez que les deux roues avant touchent le sol simultanément

AVERTISSEMENT :

Après avoir effectué des réglages, vérifiez bien d'avoir resserré les pièces correctement AVANT de réutiliser le fauteuil. Ne serrez PAS excessivement les pièces fixées au châssis. Cela pourrait endommager les montants du châssis.

Entretien

Suggestions d'entretien

1. Avant d'utiliser votre fauteuil PlayMoovin', vérifiez que tous les boulons et les écrous sont bien serrés. Inspectez toutes les pièces afin de déceler d'éventuels signes d'usure ou d'endommagement. Vérifiez le bon alignement des pièces.
2. Veillez à ce que les axes à déverrouillage rapide/tétra soient propres afin de garantir un verrouillage positif et une performance adéquate. Reportez-vous à la section abordant le réglage des axes à déverrouillage rapide/tétra à la Procédure 3 du présent manuel et montage des roues propulsives Procédure 1.
3. Nettoyez et lustrez les axes à déverrouillage rapide une fois par mois – LUBRIFIER légèrement.

AVERTISSEMENT :

N'utilisez le fauteuil que si la pression des pneus est correcte. Ne gonflez PAS les pneus excessivement. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner l'explosion des pneus et entraîner des blessures.

4. La pression des pneus recommandée est indiquée sur la paroi latérale des pneus.
5. Il convient d'inspecter les roues et les pneus régulièrement afin de déceler tout signe d'usure et de craquelures, et de les remplacer si besoin est.
6. Vérifiez régulièrement que les rayons des roues arrière ne sont pas desserrés. S'ils sont desserrés, faites-les régler par votre revendeur agréé.

7. Inspectez régulièrement les mains courantes afin de s'assurer qu'elles sont bien fixées aux roues arrière. Reportez-vous à la Procédure 4 du présent manuel.
8. Inspectez régulièrement les roulements des roues propulsives pour être sûr qu'ils sont propres et exempts d'humidité résiduelle. Reportez-vous à la Procédure 4 du présent manuel.
9. Inspectez la toile du dossier H+ afin de déceler toute déchirure ou signe d'affaissement. Ajustez ou remplacez si besoin est.
10. La toile du dossier H+ est maintenue en place au moyen de bandes Velcro autour du châssis du dossier. La toile se retire facilement. Il suffit de détacher les bandes sous le siège. Reportez-vous à la Procédure 2 du présent manuel.
11. Pour retirer le kit enfant et enlever le coussin H+. Reportez-vous à la Procédure 2 du présent manuel.
12. Essuyez la coque d'assise et du dossier à l'aide d'un chiffon propre et humide. Il est important de maintenir le fauteuil roulant propre, à la fois pour des raisons de confort et de longévité du fauteuil. Nettoyez le coque à l'aide d'un détergent non abrasif.

REMARQUE :

Il est recommandé de fréquemment nettoyer et désinfecter la coque, dossier et coussin H+.

Entreposez le fauteuil roulant dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et dans son emballage d'origine.

Visionnez les Tutos « Entretien et maintenance » sur notre chaîne **YOUTUBE @playmoovin**

Procédure I

Cette procédure décrit les opérations suivantes : Montage des roues propulsives

Montage des roues propulsives sur les fauteuils PlayMoovin'

Prendre l'axe rapide dans le logement arrière du fauteuil. Pour cela : Appuyer sur le bouton poussoir de l'axe pour effacer les billes et ainsi permettre à l'axe de sortir de son logement à l'arrière du fauteuil.

Maintenir le bouton poussoir appuyé (billes effacées) et l'insérer dans le moyeu de la roue puis dans le porte axe du moyeu du fauteuil.



Relâcher le bouton poussoir de l'axe rapide une fois la roue montée. Vérifier que le bouton poussoir à bien repris sa position d'origine.

Contrôler que la roue propulsive soit bien en place en tirant dessus.

Logement arrière des axes rapides



FreeMoovin'

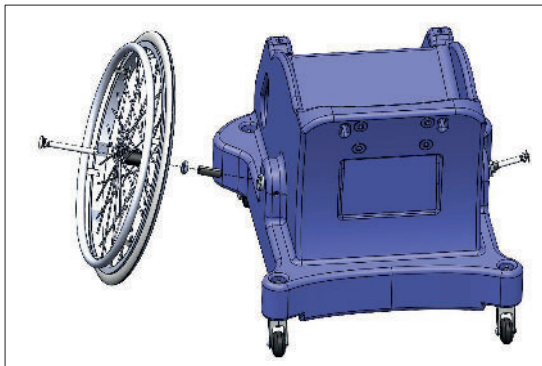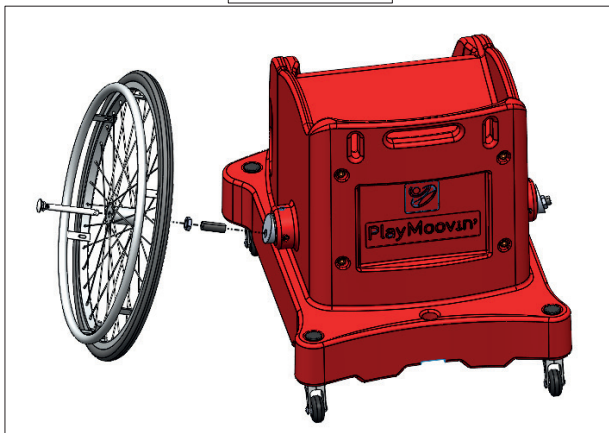

KidsMoovin'

Procédure 2

Cette procédure décrit les opérations suivantes : Remplacement du coussin H+ et du kit enfant, mise en place du dossier H+

Remplacement du coussin H+ (insert en mousse)

1. Levez le coussin existant et retirez-le de la toile d'assise. Voir Fig. 4.
2. Ouvrez le coussin et sortez l'insert en mousse.
3. Remplacez l'insert en mousse
4. Refermez le coussin et repositionnez-le sur la toile d'assise.



Fig. 4

Mise en place du dossier H+

1. Placer le dossier H+ dans les logements de la coque et enfoncer jusqu'au blocage du dossier. Voir Fig. 5.
2. Vérifiez que le dossier soit suffisamment enfoncé.
3. Le dossier H+ ne doit pas bouger d'en avant en arrière. Voir Fig. 6.
4. Le dossier H+ bouge de droite à gauche pour plus de liberté de mouvements.



Fig. 5

Remplacement du kit enfant

Placez-le réducteur d'assise, coté blanc contre la coque du fauteuil et insérer la sangle de maintien abdominal dans les fentes. Pour le réhausseur de pieds, il s'emboîte au niveau du logement des pieds. Voir Fig. 2.



Fig.2

ATTENTION :

Le Velcro utilisé sur la sangle peut s'accrocher aux vêtements de l'utilisateur et les endommager.



Fig.6

Procédure 3

Cette procédure décrit les opérations suivantes : Réglage de l'axe à déverrouillage rapide


Réglage de l'axe à déverrouillage rapide

1. Déposez la roue propulsive avec l'axe à déverrouillage rapide.
2. Sortez l'axe à déverrouillage rapide de la roue. Pour cela, appuyez sur le bouton d'arrêt de l'axe à déverrouillage rapide, puis faites glisser l'axe à travers le moyeu de la roue. Voir Fig. 7.
3. Relâchez le bouton d'arrêt de l'axe à déverrouillage rapide et vérifiez que les boutons de blocage sont totalement sortis. Augmentez ou réduisez le jeu en ajustant l'écrou de blocage sur l'extrémité de l'axe à déverrouillage rapide. Voir Fig. 7.
4. Remontez la roue arrière sur le fauteuil.

► REMARQUE :

À noter que l'axe à déverrouillage rapide peut être démonté et sa longueur peut être ajustée.

Fig. 7

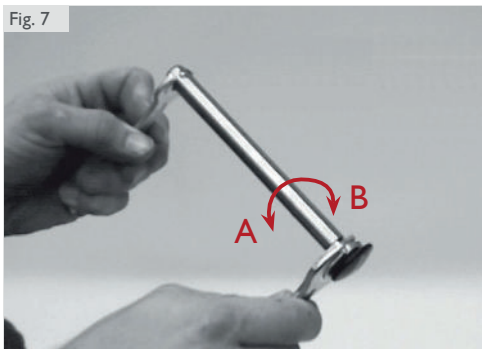

A = Allonger B = Raccourcir

⚠ AVERTISSEMENT :

Si vous avez effectué le moindre ajustement des axes à déverrouillage rapide, vous DEVEZ vérifier les freins d'immobilisation des deux roues.

Vérifiez toujours que les roues sont correctement remontées. Avant de réutiliser le fauteuil, tirez sur les roues arrière pour vérifier que le bouton d'arrêt de l'axe à déverrouillage rapide est sorti.

La roue propulsive doit rester fermement en place.

Procédure 4

Cette procédure décrit les opérations suivantes :

Remplacement de la main-courante ; Réparation/Remplacement de la roue propulsive, du pneu/de la chambre à air

⚠ AVERTISSEMENT :

L'utilisation du fauteuil avec une main-courante endommagée est dangereuse et il convient de la remplacer.

Remplacement de la main-courante

1. Enfoncez le bouton de blocage pour déposer la roue propulsive du fauteuil.
2. Dégonflez entièrement la chambre à air. Pour cela, enfoncez la tige au centre de la valve.
3. Tout en maintenant délicatement le pneu, la chambre à air et le fond de jante d'un côté, tenez les vis à six pans et retirez les écrous de blocage qui maintiennent la main-courante fixée à la roue arrière.
4. Retirez la main-courante.
5. Installez la NOUVELLE main-courante en effectuant les mêmes étapes dans le sens inverse.
6. Gonflez le pneu à la bonne pression (indiquée sur le flanc du pneu).
7. Remontez la roue arrière sur le fauteuil.
8. Répétez la procédure pour l'autre main-courante, si besoin .



Fig7 bis

Réparation/Remplacement de la roue propulsive, du pneu/de la chambre à air

1. Démontez la roue propulsive. Retirez l'axe rapide de la roue propulsive et le placer dans le support arrière. (Fig.7bis)
2. Dégonflez entièrement la chambre à air. Pour cela, enfoncez la tige au centre de la valve.
3. Dévissez la bague de sécurité de la valve (valves Presta uniquement). À l'aide de démonte-pneus, sortez le talon du pneu de la jante, dévissez le bague de sécurité de la valve (valves Presta uniquement) et sortez la chambre à air. Sortez le pneu de la jante. Inversez la procédure pour réinstaller le pneu/la chambre à air.
4. Gonflez le pneu à la bonne pression (indiquée sur le flanc du pneu).
5. Remontez la roue propulsive sur le fauteuil.
6. Répétez la procédure pour l'autre main-courante, si besoin est.

■ REMARQUE :

Si vous remontez des roues arrière ou des pneus d'une taille différente de celle préalablement utilisée, la partie arrière du fauteuil sera relevée ou abaissée, ce qui pourrait compromettre l'équilibre. N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou conseiller en mobilité pour de plus amples informations.

⚠ AVERTISSEMENT :

Les pneus **DOIVENT** être dégonflés avant toute procédure de démontage.

⚠ AVERTISSEMENT :


Ne regonflez les pneus qu'après les avoir remontés.

⚠ AVERTISSEMENT :

AVANT de réutiliser le fauteuil, vérifiez que le bouton d'arrêt de l'axe à déverrouillage rapide est entièrement sorti.

Procédure 5

Cette procédure décrit les opérations suivantes : Remplacement des fourches et des roulettes du kidmoovin' (NM10)

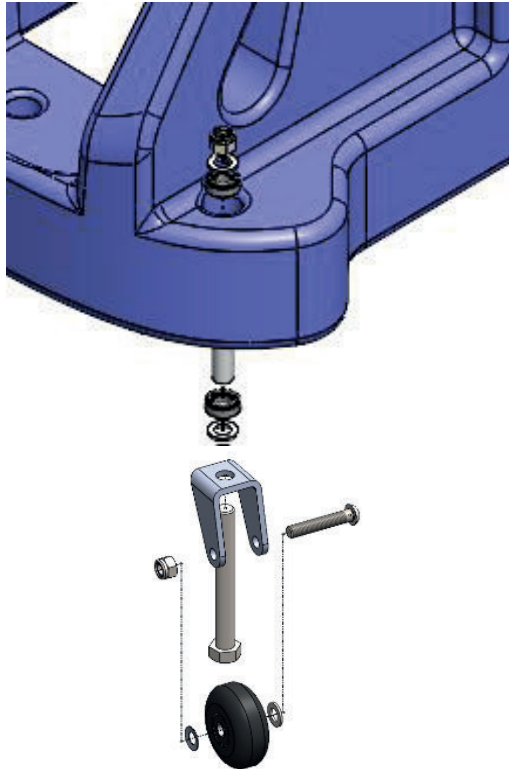

- Mettre 1 roulement fourche (6001 2RS) dans les 4 réservations supérieures de la coque KidsMoovin'.
- Sur chaque fourche KidsMoovin' enfilez, sur la vis fourche KidsMoovin', dans l'ordre suivant :
 - 1 rondelle M12 type Z
 - 1 roulement fourche (6001 2RS)
 - Une entretoise PVC-U
- Enfilez ce montage par les réservations inférieurs de la coque KidsMoovin'

- Une fois que le haut de la vis fourche KidsMoovin' fait saillie par le roulement fourche supérieur.
- Enfiler 1 rondelle M12 type Z et 1 écrou frein vis fourche tôle.
- Mettre la Clé plate de 19 « usinée » sur la tête de la vis fourche KidsMoovin' (entre les pattes de la fourche tôle).
- A l'aide de la Clé à pipe de 19 débouchée, placée sur l'écrou frein dans la réservation supérieur serrez jusqu'au blocage.
- S'assurer que la fourche KidsMoovin' tourne librement.
- Répéter les 6 dernières étapes pour les 3 autres fourches KidsMoovin'.


△ ATTENTION :

PlayMoovin' déconseille de remplacer les fourches ou les roulettes par une taille différente de celle utilisée à l'origine avec le fauteuil.

Le changement de taille des fourches ou des roues propulsives aura pour effet de compromettre le bon fonctionnement du fauteuil et l'équilibre de l'utilisateur.

Procédure 6

Cette procédure décrit les opérations suivantes : Remplacement des fourches et des roulettes du FreeMoovin' (NMO6)

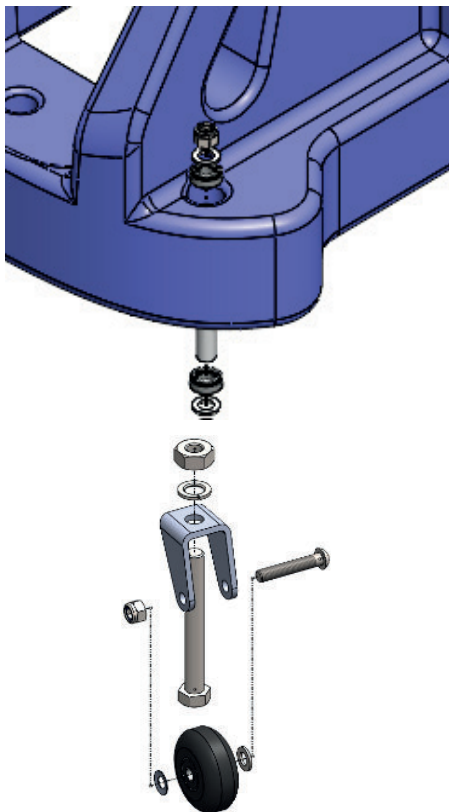

- Mettre 1 roulement fourche (6001 2RS) dans les 4 réservations supérieures de la coque FreeMoovin'.
- Sur chaque fourche FreeMoovin' enfiler, sur la vis fourche FreeMoovin', dans l'ordre suivant :
 - 1 rondelle M12 type Z
 - 1 roulement fourche (6001 2RS)
 - Une entretoise PVC-U
- Enfiler ce montage par les réservations inférieurs de la coque FreeMoovin'.
- Une fois que le haut de la vis fourche FreeMoovin' fait saillie par le roulement fourche supérieur.
- Enfiler 1 rondelle M12 type Z et 1 écrou frein vis fourche tôle.
- Mettre la Clé plate de 19 « usinée » sur la tête de la vis fourche FreeMoovin' (entre les pattes de la fourche tôle).
- A l'aide de la Clé à pipe de 19 débouchée, placée sur l'écrou frein dans la réservation supérieur serrez jusqu'au blocage.
- S'assurer que la fourche FreeMoovin' tourne librement.
- Répéter les 6 dernières étapes pour les 3 autres fourches FreeMoovin'.

⚠ ATTENTION :

PlayMoovin' ~~déconseille~~ de remplacer les fourches ou les roulettes par une taille différente de celle utilisée à l'origine avec le fauteuil.

Le changement de taille des fourches ou des roues propulsives aura pour effet de compromettre le bon fonctionnement du fauteuil et l'équilibre de l'utilisateur.

Procédure 7

Cette procédure décrit les opérations suivantes : Réglage de la hauteur de la bascule sur le FreeMoovin'

	<ul style="list-style-type: none"> - Visser le porte axe rapide moyeu dans le moyeu 60.3 - Ajuster la position du porte-axe rapide moyeu, laisser 5 à 8 mm de filetage après l'écrou bas moyeu.
	<ul style="list-style-type: none"> - Bloquer le porte-axe rapide moyeu avec le contre écrou bras moyeu, à l'aide d'une clé plate de 24.
	<p>Plus le porte axe rapide moyeu dépassera, moins il y a de bascule du fauteuil</p>

AVERTISSEMENT :

La position du porte axe rapide moyeu a un impact direct sur la stabilité du fauteuil. Tout changement apporté à l'un ou à plusieurs de ces éléments peut compromettre la stabilité du fauteuil. Soyez **EXTRÊMEMENT** prudent lorsque vous utilisez pour la première fois une nouvelle position d'assise.

Procédure 8

Cette procédure décrit les opérations suivantes : Réglage de la bascule sur le KidsMoovin'

	<ul style="list-style-type: none"> - Visser le porte axe rapide moyeu dans le moyeu 33.7 - Ajuster la position du porte-axe rapide moyeu, laisser 5 à 8 mm de filetage après l'écrou bas moyeu. - Bloquer le porte-axe rapide moyeu avec le contre écrou bras moyeu, à l'aide d'une clé plate de 24. - Plus le porte axe rapide moyeu dépassera, moins il y a de bascule du fauteuil
	

⚠ AVERTISSEMENT :

La position du porte axe rapide moyeu a un impact direct sur la stabilité du fauteuil. Tout changement apporté à l'un ou à plusieurs de ces éléments peut compromettre la stabilité du fauteuil. Soyez **EXTRÊMEMENT** prudent lorsque vous utilisez pour la première fois une nouvelle position d'assise.

Caractéristiques techniques

ARTICLE	Min.	Max.
Largeur assis	360 mm	410 mm
Hauteur d'assise totale	558 mm	634 mm
Longueur totale du châssis	733 mm	819 mm
Poids en kg	12 kg	15 kg
Poids maximum de l'utilisateur	-	100 kg

► **REMARQUE :**

Les fauteuils PlayMoovin' sont fabriqués en France (Origine France Garantie) et testés et certifiés par le CERAH


Muni du système DSD (Dynamique-Solidité-Durabilité) : la barre de carrossage est rotomoulée dans le fauteuil (innovation PlayMoovin') Fig. 8




Fig.8

Dimension :

► **FreeMoovin'**

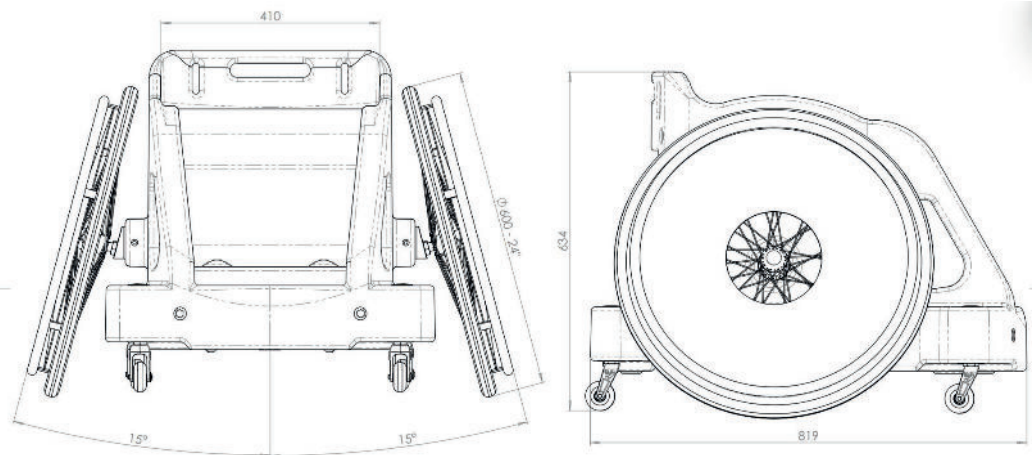

► KidsMoovin'

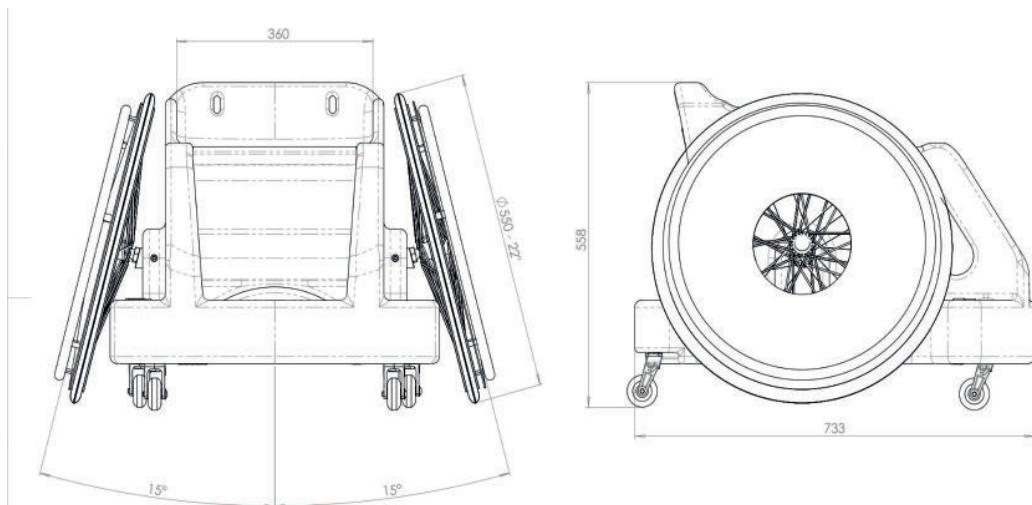

Recyclage/Élimination

Avant de laisser une autre personne utiliser le fauteuil, il convient de l'apprêter soigneusement. Toutes les surfaces entrant en contact avec le nouvel utilisateur doivent être nettoyées et désinfectées.

Vous trouverez ci-dessous une description des matériaux utilisés dans la fabrication de votre fauteuil.

- **Aluminium** : Fourches des roulettes, moyeu et jante des roues, main-courante, moyeu.
- **Inox** : Éléments de fixation, axe rapide, porte axe, main-courante, barre de carrossage, visseries
- **Plastique** : PE Coque
- **Emballage** : cartons
- **Garniture** : Polyester tissé,



La mise au rebut ou le recyclage doit être assuré par une entreprise spécialisée ou dans une décharge publique. Vous pouvez également ramener votre fauteuil à votre revendeur pour sa mise au rebut (service pouvant être facturé).

Garantie

GARANTIE

La garantie commerciale, ou garantie constructrice, est valable uniquement sur des produits neufs.

Les biens vendus sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception dans les conditions ci-dessous. Le vice de fonctionnement doit apparaître dans une période de 5 ans à compter de la date de facturation pour la coque et de 2 ans pour toutes les autres pièces mécaniques hors pièces d'usures.

Les pièces de remplacement ou les pièces refaites sont garanties dans les mêmes termes et conditions que le matériel d'origine et pour une période de 6 mois.

La garantie est exclue :

- si la matière ou la conception défectueuse provient de l'acheteur,
- si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectuée sans autorisation,
- si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du bien ou d'une négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur,
- si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure.


Au titre de la garantie, nous remplacerons gratuitement les pièces reconnues défectueuses par nos services techniques ou par des tiers désignés par nous.

Cette garantie couvre le matériel et lui seul ; le coût des frais de main d'œuvre, frais annexes, transport du matériel ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparées ou remplacées, sont à la charge de l'acheteur, de mêmes qu'en cas de réparation sur l'aire d'installation.

Les pièces remplacées gratuitement sont remises à notre disposition et redeviennent notre propriété.

Veillez noter ici la référence du modèle de votre fauteuil et le numéro de série (indiqués sur la plaque signalétique apposée sur coque : type et SN) que vous devrez fournir lors de tout appel concernant votre fauteuil. Ces informations sont utiles, en autres, pour la commande de pièces de rechange car elles nous aident à déterminer les pièces que vous possédez et permettent de vous proposer des références adaptées à votre fauteuil.

Modèle du fauteuil :	N° de série :

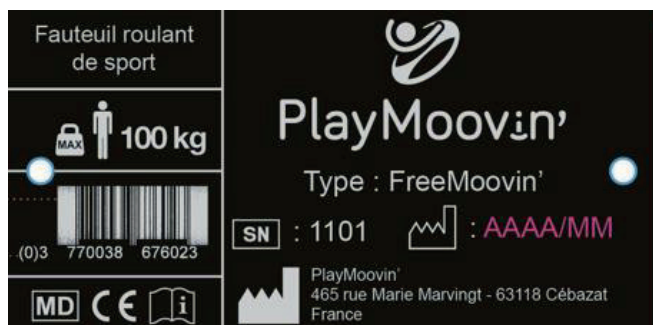

PlayMoovin'
 465 rue Marie Marvingt
 63118 CEBAZAT
 France
 contact@playmoovin.com



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
EC Declaration of Conformity

Entreprise : Company :	PlayMoovin' 465 Rue Marie Marvingt 63118 Cébazat
SRN :	FR-MF-000047201
Nom du produit : Product name	FreeMoovin'
Basic UDI-DI :	37700386760232D
Usage : Intended purpose :	<p>Ces fauteuils roulants multisports sont destinés à un usage exclusif par des personnes en situation de handicap. Ils sont spécialement conçus pour la pratique d'activités sportives, en intérieur comme en extérieur, et adaptés aux utilisateurs ayant une mobilité réduite.</p> <p>These multisport wheelchairs are intended for exclusive use by individuals with disabilities. They are specifically designed for sports activities, both indoors and outdoors, and are suitable for users with reduced mobility.</p>

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) auquel(s) se rapporte cette déclaration est un dispositif de classe 1 et est conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

We declare under our sole responsibility that the product (s) to which this declaration relates, is a class 1 device, and is in conformity with the requirements of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.

Name :	Christophe Pradelle	Sébastien Passemard
Signature :		
Fonction :	Technical Director	Personne Responsable for regulatory compliance
Place and date of issue	Cébazat le 17/05/2025	Cébazat le 17/05/2025

Date de Création : 17/03/2025 version 1

Accessoires fauteuil PlayMoovin'



Kit enfant
(Réhausse
pieds +
réducteur
d'assise)



Sac de roues
(4 roues)

Dossier H+

**Dossier
confort**

Coussin

**Ceinture
clipsable**

**Enjoliveur
incassable**
(personnalisation)

KneeSafe
(protection genoux)

**Main
courante inox**

